

DOLO HEVERT ROLL-ON

Zur Akupressur und Akupressur-Unterstützung

Dolo Hevert Roll-On

Medizinprodukt

Zur Akupressur und Akupressur-Unterstützung

Anwendungsgebiete

Medizinprodukt zur Akupressur und Akupressur-Unterstützung.

Zur Unterstützung der physikalischen Behandlung von schmerzhaften Verletzungen des Muskel-, Sehnen- und Gelenksystems, Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen, Sportverletzungen, rheumatischen Beschwerden, Bandscheibenbeschwerden, Schulter-Arm-Syndrom, Sehnen-scheidenentzündungen, Ischias und anderen Nervenschmerzen.

Gegenanzeigen

Dolo Hevert Roll-On darf nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen Salicylate
- bei Hautverletzungen
- bei entzündlichen Hauterkrankungen und Ekzemen
- in Form großflächiger Anwendung oder Langzeitanwendung
- bei Schwangeren, Säuglingen und Kleinkindern sowie Patienten mit Nierenfunktionsstörungen
- in der Stillzeit im Brustbereich

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Dolo Hevert Roll-On darf nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder offene Wunden gelangen. Hände nach dem Auftragen gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Bei andauerndem Unwohlsein oder anderen Symptomen, die während oder nach der Anwendung von Dolo Hevert Roll-On auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die gleichzeitige Anwendung von Mitteln, die die Blutgerinnung hemmen (z.B. Warfarin und andere Cumarine, ASS und andere Salicylate) kann bei intensiver Anwendung von Dolo Hevert Roll-On zu erhöhter Blutungsneigung führen und in Einzelfällen Blutungen hervorrufen.

Die Permeation (Eindringen durch die Haut) lokal angewandeter Arzneimittel, z. B. schmerzstillender Einreibungen, kann verstärkt werden.

Bei großflächiger Anwendung in hoher Konzentration können Wechselwirkungen mit Methotrexat (Mittel zur Chemotherapie, Methotrexat-Toxizität erhöht) und Sulfonylharnstoffen (Mittel bei Diabetes, hypoglykämische Wirkung verstärkt) auftreten.

Art der Anwendung

Mit Dolo Hevert Roll-On werden die schmerzenden Stellen oder die der Indikation entsprechenden Akupressurpunkte 3- bis 4-mal täglich mit leichtem Druck kurzzeitig und punktuell massiert.

Nur zur äußerlichen Anwendung auf unversehrter Haut bestimmt!

Nebenwirkungen

Selten können Hautreizungen auftreten. In Einzelfällen wurden Kontaktallergien beobachtet.

Hinweise zu Haltbarkeit und Aufbewahrung

Das Produkt soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und Umkarton angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25 °C lagern!

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Zusammensetzung

2-Propanol, gereinigtes Wasser, Hydroxypropylcellulose, Methylsalicylat.

Packungsgröße

50 ml Roll-on Flasche.

Hersteller

Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG

In der Weiherwiese 1

D-55569 Nussbaum

www.hevert.de

Stand der Information

August 2009

Dolo Hevert Roll-On - Zur Akupressur-Unterstützung

Die Akupressur ist eine weit verbreitete physikalische Methode zur Schmerzbehandlung und anderen therapeutischen Zwecken. Es handelt sich dabei um die Druckbehandlung von ausgewählten Punkten oder Bereichen in der Haut mit dem Ziel, Schmerzzustände zu lindern oder andere Funktionsstörungen zu bessern. Im Vordergrund der Anwendung stehen Schmerzen an Muskeln, Sehnen, Gelenken oder Nervenbahnen. Akupressur kann gut zur Selbstbehandlung schmerzender Stellen verwendet werden.

Die Akupressur stützt sich wie die Akupunktur auf die Grundlagen der Traditionellen Chinesischen Medizin und verwendet die gleichen Punkte, die auf bestimmten Leitbahnen (Meridianen) liegen. Durch die Massage der Punkte wird der Fluss der Lebensenergie (Qi) dort ange-regt, wo er vermindert oder blockiert war.

Dolo Hevert Roll-On dient dazu, die Anwendung der Akupressurtechnik zu unterstützen. Das enthaltene Gel, das während der Rollbewegung austritt, dient dabei als Gleitmittel. Der physikalische Gleiteffekt unterstützt die einfache und effektive Anwendung. Durch die Verdunstung des Bestandteils 2-Propanol, das mit dem Alkohol verwandt ist, wird außerdem ein lokaler Kühleffekt erzeugt.

Der durch Dolo Hevert Roll-On unterstützte Akupressur-effekt und der Kälteeindruck lindern Schmerzzustände. Später entsteht ein angenehmes Gefühl der Wärme, das die Entspannung fördert.

Mit dem wohltuenden Duft von Wintergrün.

Alles Gute für Ihre Gesundheit wünscht Ihnen Ihr Hevert-Team.

Weitere Tipps rund um Dolo Hevert Roll-On sowie eine Auswahl leserwerter Bücher zum Thema Gesundheit finden Sie im Internet unter

<http://dolo.hevert.de>



HEVERT

ARZNEIMITTEL

Gemeinsam für Kinder

Für jede verkaufte Packung spendet Hevert-Arzneimittel 1 Cent für das Schulprojekt „Schulbausteine für GANDO e.V.“ in Burkina Faso (Westafrika)

www.fuergando.de